



Pruebas Rápidas de Alta Calidad
Con Tecnología de Punta

Oral Cube


Prueba de Saliva

AMP, THC, COC, BAR, BZO, OPI


- **Fácil de Utilizar**
- **Recolección y Prueba de un Solo Paso**
- **No Invasiva**
- **No Requiere de Instrumentación**
- **Incluye Colector de muestra, gotero y el dispositivo o cassette de prueba**




Oral Cube

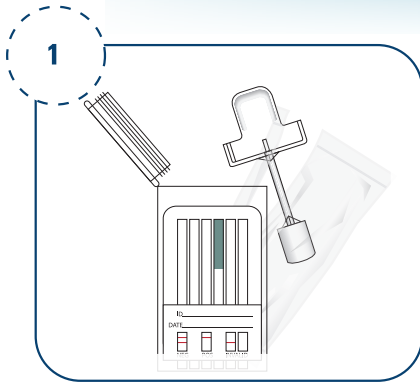


1 No se meta nada a la boca por diez minutos antes de realizar la prueba. Saque el recolector de muestra y el cubo de prueba del sobre sellado. Abra la envoltura del recolector de muestra.

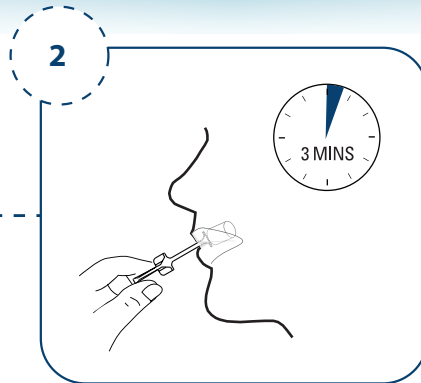


2 Inserte el lado de la esponja del recolector de muestra dentro de la boca y remójelo en la saliva por 3 minutos. (Nota: El tiempo deberá ser mayor en gente que tenga pocasaliva). Si la cantidad de saliva que se extraiga y se deposite dentro del cubo de prueba nos suficiente para realizar la prueba, recolecte más saliva utilizando un recolector de saliva nuevo y extraiga la saliva dentro del cubo de prueba de nuevo.

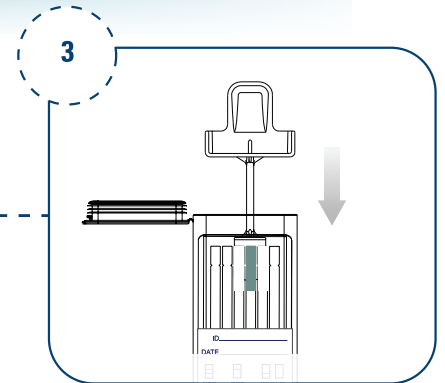

3 Mantenga el cubo de prueba verticalmente e inserte el recolector de muestra con la esponja saturada dentro del cubo de prueba. Asegúrese de posicionar correctamente el recolector de muestra dentro del espacio designado para este utilizando las guías del cubo de prueba y presione el recolector de muestra para extraer la mayor cantidad posible de saliva.

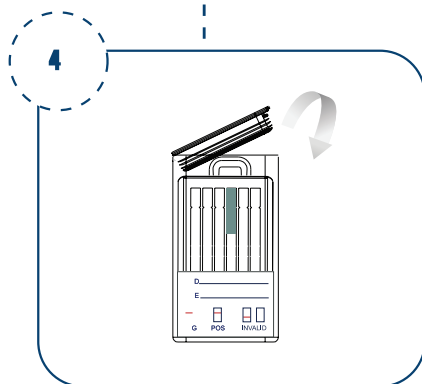

4 Presione la tapa para cerrar el cubo de prueba. Mantenga el cubo de prueba en posición vertical hasta que empiece a leer los resultados.

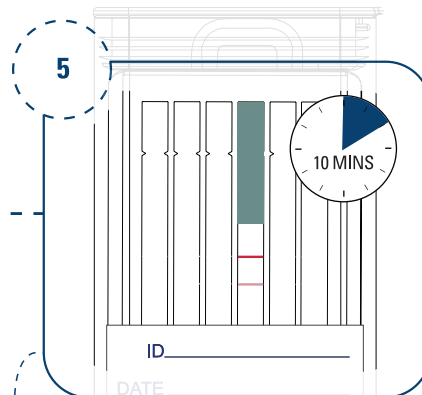

Interpretación de Resultados de Droga

Lea los resultados a los 10 minutos. No lea los resultados de la prueba después de una hora. Cualquier línea, sin importar su intensidad, se considera una línea.

RESULTADOS



negativo positivo inválido

