
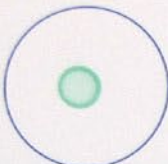
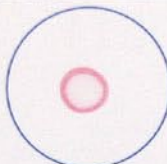
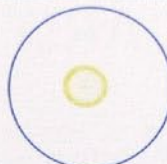


# Tarjeta para determinación de grupo sanguíneo y factor RH en sitio

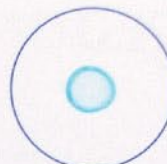

			
<b>Anti-A</b>	<b>Anti-B</b>	<b>Anti-D</b>	<b>Control</b>
Name - Nombre - Nome - Nome - Nom - Name - Név - Navn - Navn - Namn - Nimi		Address - Dirección - Endereço - Direzione - Adresse - Adressieren - Cim - Adresse - Adresse - Adress - Osoite	
Born - Nacimiento - Aniversário - Nato - Date de naissance - Geboren - Született - Födelsdato - Födelsdato - Födelsdatum - Syntymäaika		Signature - Firma - Signer - Firma - Signature - Unterschrift - Aláírás - Underskrift - Underskrift - Namnteckning - Allekirjoitus	
ABO	Rhesus (D)	Date - Fecha - Date - Data - Date - Datum - Dátum - Dato - Dato - Datum - Päivämäärä	

LOT 11371 & 2013-09 F

51



  
**ELDONCARD®**



## **Determinación de grupo sanguíneo y factor RH en sitio**

Utilizando nuestro EldonKit usted puede realizar determinaciones sanguíneas y factor RH inmediatamente en sitio. Esta prueba inmediata se basa en la técnica de aglutinación directa. Todos los componentes necesarios vienen incluidos en el EldonKit en una presentación compacta y fácil de transportar con excepción de las gotas de agua requeridas para realizar la prueba.

## **El uso de la EldonCard ahorra tiempo y dinero**

Sangre entera puede ser utilizada, ya que el campo de control de la **EldonCard** descubrirá cualquier falsa aglutinación causada por sustancias, las cuales, en casos raros se encuentren presentes en el plasma. Por lo consecuente no es necesario separar los eritrocitos y el plasma de la sangre por medio de procesos costosos y laboratorios de centrifugación y lavado, sin dichos procesos la **EldonCard** solo requiere unas cuantas gotas de sangre para realizar la prueba. Como solo se requiere de una cantidad mínima de sangre, esta puede ser capilar ahorrando una cantidad considerable de dinero en el proceso de recolección de muestras de sangre venosa estabilizada. Esto no excluye la posibilidad de utilizar muestras de sangre venosa estabilizada o células rojas lavadas. Si ya existen tales muestras pueden ser utilizadas sobre la **EldonCard** para realizar la prueba.

## **Resultados en tan solo 2 minutos**

Este tiempo incluye desde la limpieza de la piel del dedo del donante hasta la lectura e interpretación de los resultados de la **EldonCard**. Siempre lea la tarjeta antes de que la ponga sobre la superficie plana para que se seque. Ningún otro dispositivo o prueba en el mercado le da los resultados en tan poco tiempo, haciendo la **EldonCard** la herramienta perfecta para agrupación sanguínea en situación de emergencia.

## **Fácil de utilizar**

El proceso es tan sencillo que cualquier persona puede realizar la prueba siguiendo las instrucciones incluidas, produciendo resultados seguros.

## **Registro permanente de aglutinación**

El utilizar reactivos líquidos para realizar pruebas de agrupación sanguínea requiere que las aglutinaciones sean observadas inmediatamente ya que estas son desechadas. Con la **EldonCard** el patrón de aglutinación se mantendrá sobre la tarjeta, la cual puede ser engrapada o pegada al historial del paciente o guardarse en un archivo. La mica protectora que se incluye con la **EldonCard** encapsula cualquier material infeccioso de la sangre y protege la muestra biológica contra talladuras.



# USO CLÍNICO DE LAS ELDONCARD®

## Dentro del Banco de Sangre

Hospitales que tengan un sistema automatizado de agrupación sanguínea se beneficiarán del uso de la **EldonCard**. En la mayoría de los países industrializados muchos de los bancos de sangre han invertido en equipo muy costoso automático y computarizado para realizar las agrupaciones sanguíneas. La **EldonCard** ofrece un método igual de preciso pero sin requerir una inversión inicial tan costosa. La **EldonCard** es un producto estandarizado que produce resultados iguales entre bancos de sangre.

## Antes de realizar una transfusión

La tarjeta **EldonCard** es muy útil para realizar pruebas de grupo sanguíneo previo a una transfusión para asegurar que el paciente reciba el tipo de sangre adecuado y que no haya ocurrido un error o confusión entre el tipo de sangre del donante y el receptor.

Las cualidades especiales de la **EldonCard** se pueden resumir de la siguiente forma:

- Vida de Anaquel de 24 meses cuando se almacena entre 5 y 37 grados centígrados.
- La **EldonCard** envuelta en su sobre de aluminio no tienen que ser almacenadas en refrigeradores.





## En unidades móviles de colección de sangre

Como una herramienta de diagnóstico portátil, la **EldonCard** es la opción ideal para realizar pruebas de grupo sanguíneo fuera del banco de sangre. En muchas instancias la determinación del grupo sanguíneo no se realiza hasta llegar al banco de sangre. Si el grupo sanguíneo más valioso (Grupo O) puede ser seleccionado y llevado a través del proceso de separación, un tamizaje de la sangre es una necesidad. Para tal propósito es muy difícil encontrar un método más adecuado que la **EldonCard**.

## Determinación de factor Rh en la sangre de las mujeres embarazadas

Cuando se utiliza el Eldon Identity Card (Tarjeta de Identificación Eldon) el doctor o profesional de la salud puede realizar una prueba del grupo sanguíneo y factor Rh, subsecuentemente entregar la tarjeta al paciente para que este le adjunte su fotografía y la pueda guardar en su cartera como identificación de grupo sanguíneo. Esta tarjeta se convierte en una herramienta muy útil y valiosa que el paciente carga en su persona en caso de llegar a necesitar saber su tipo de sangre cuando visite a un doctor o en caso de un accidente donde se requiera una transfusión sanguínea.


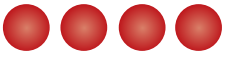

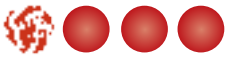





## Otras aplicaciones clínicas


Las fuerzas armadas, instituciones forenses, grupos de rescate, sistemas de transporte colectivo como navíos y ubicaciones remotas como plataformas petroleras son ejemplos de clientes que se pueden beneficiar del uso de la **EldonCard**.

## Aplicaciones no clínicas de la EldonCard

Ya que es sumamente sencillo realizar la prueba de grupo sanguíneo y factor Rh utilizando la **EldonCard** más y más personas fuera del campo de las ciencias de la salud la utilizan, tales como maestros de secundaria o preparatoria para enseñar a sus alumnos la relación entre un antígeno y su correspondiente anticuerpo.

Tabla de interpretación de resultados

<b>O</b> positivo		<b>O</b> negativo		<b>A</b> positivo	
<b>A</b> negativo		<b>B</b> positivo		<b>B</b> negativo	
<b>AB</b> positivo		<b>AB</b> negativo		<b>Invalido</b>	

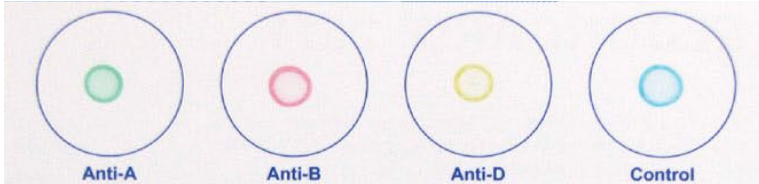

Un resultado con aglutinación en el campo de control, es un **resultado inválido**.

**Distribuidor Autorizado Para México:**  
**Tecnología y Diagnósticos del Norte S.A. De C.V.**  
**info@tdnorte.com www.tdnorte.com**

**La EldonCard cuenta con la aprobación de EC, FDA y Registro Sanitario en México.**